


MAGIC SMILE PRO
НАБІР МАКСИМАЛЬНОЇ СИЛИ ДЛЯ КАБІНЕТНОГО ВІДБІЛЮВАННЯ ЗУБІВ

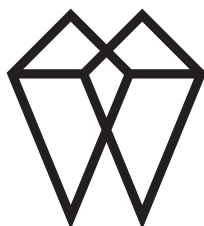

MAGIC SMILE

TEETH WHITENING

38% HYDROGEN PEROXIDE

ДО 12 НАНЕСЕНЬ

MAGIC SMILE

Професійне відбілювання

Повертайте людям сяйво!

Magic Smile – комплексна система відбілювання зубів, заснована на гелях Пероксид Карбаміду 44%, Перекис Водню 25%, Перекис Водню 38%, лампах Magic Light Pro і Pro+ та домашніх наборах Magic Smile Home.

Перекис Водню 38% – це найсильніший гель Magic Smile, призначений для максимальних та швидких результатів кабінетного відбілювання. Червоний колір гелю полегшує його диференціацію, нанесення та подальше змивання.



Економія часу

Ретельно підібрані концентрації гелю та унікальні протоколи відбілювання прискорюють процедуру відбілювання без значного ризику чутливості зубів.



Розраховано на декількох пацієнтів

Набір розрахований до 4 пацієнтів і до 12 нанесень, в залежності від площі поверхні та кількості використаного гелю.



Індивідуальні протоколи

Magic Smile допоможе Вам обрати протокол відбілювання та провести індивідуальну процедуру з урахуванням особливостей зубів пацієнта.



Безпека у використанні

Для укріплення зубів і зниження чутливості до гелів додані мінерали Ca, Mg, P, NaF. Гелі не містять абразиви, нітрати чи шкідливі домішки.



Повний комплекс відбілювання

Використання домашніх наборів Magic Smile після клінічного відбілювання забезпечує найкращі результати і створює додаткові джерела доходу для Вашої практики.



Довготривалий результат

Дотримання рекомендованих протоколів та подальше відбілювання домашніми наборами Magic Smile Home забезпечує результат до 10 відтінків, який тримається до 28 місяців.

Вміст набору:

Гель для відбілювання Перекис Водню 38% (4.5 мл) – 1 шт.

Гель для захисту ясен Magic Dam (3 мл) – 1 шт.

Гель для ремінералізації Magic Minerals (3 мл) – 1 шт.

Аплікатор-браш – 4 шт.

Тампон з вітаміном Е – 4шт.

Насадки-змішувачи – 4 шт.

Насадки-канюлі – 8шт.

Умови зберігання:

При температурі 4 - 10°C

Не перегрівати і не переохолоджувати.

Уникати прямих сонячних променів.

Система Magic Smile розроблена в США

РЕКОМЕНДОВАНІ ПРОТОКОЛИ ВІДБІЛЮВАННЯ

Для активації гелів використовуйте лампи Magic Light Pro+ або Magic Light Pro

Протокол Відбілювання з Перекис Водню 38% (базовий протокол для цього набору)

Комфорт та оптимальні результати

1-ше нанесення: 15 хвилин з використанням Перекис Водню 38%

2-ге нанесення: 15 хвилин з використанням Перекис Водню 38%

3-тє нанесення: 15 хвилин з використанням Перекис Водню 38%

Всього 3 нанесення¹

УВАГА: Цей протокол може підвищити чутливість зубів.

За можливості, рекомендуємо використовувати протоколи відбілювання, наведені нижче.

Протокол «Gentle»

Комфорт та оптимальні результати

1-ше нанесення: 20 хвилин з використанням Пероксид Карбаміду 44%

2-ге нанесення: 20 хвилин з використанням Пероксид Карбаміду 44%

3-тє нанесення: 20 хвилин з використанням Пероксид Карбаміду 44%

Всього 3 нанесення¹

ВАЖЛИВО: За необхідності, процедуру можна розділити на 3 дні, щоб зменшити ризик підвищення чутливості зубів

Протокол «Balanced»

Баланс між вражаючим результатом та чутливістю зубів

1-ше нанесення: 20 хвилин з використанням Пероксид Карбаміду 44%

2-ге нанесення: 20 хвилин з використанням Перекис Водню 25%

3-тє нанесення: 15 хвилин з використанням Перекис Водню 38%

Всього 3 нанесення¹

Протокол «Maximum»

Максимальні результати без жодних компромісів

1-ше нанесення: 20 хвилин з використанням Пероксид Карбаміду 44%

2-ге нанесення: 15 хвилин з використанням Перекис Водню 38%

3-тє нанесення: 15 хвилин з використанням Перекис Водню 38%

4-те нанесення: 15 хвилин з використанням Перекис Водню 38%

Всього 4 нанесення¹

УВАГА: Цей протокол може підвищити чутливість зубів

¹Одне нанесення включає верхню та нижню щелепу

ПРОЦЕДУРА ВІДБІЛЮВАННЯ

Підготовка

1. Розмістіть пацієнта в кріслі, надягніть нагрудник та захисні окуляри.
2. Для зволоження губ скористайтесь тампоном з вітаміном Е. Візьміть головку з лініями догори і надломіть її, щоб рідина з вітаміном Е спустилась і змочила протилежний кінець тампона, яким змастить губи пацієнта.
3. Вставте еластичний ретрактор.
4. Обов'язково зафіксуйте колір зубів до початку процедури, щоб відстежувати результати відбілювання.
5. Проведіть механічну чистку зубів, щоб видалити наліт для кращого проникнення відбілюючого гелю.

Нанесення гелю

6. Ізолюйте ясенний край рідким коффердамом Magic Dam.
7. Висушіть зуби, відбілюючий гель слід наносити лише на сухі зуби.
8. Візьміть необхідний шприц з відбілюючим гелем (для отримання додаткової інформації див. Протоколи відбілювання) і встановіть насадку-канюлю для зручності нанесення. Якщо це подвійний шприц, то зніміть ковпачок і зіставте тонкий і товстий отвір шприца з відповідними помаранчевими пазами в насадці-змішувачі і обережно встановіть насадку. Прокрутіть синій фіксатор за годинниковою стрілкою, щоб щільно закріпити насадку. При натисканні на поршень гель і активатор будуть змішуватися в насадці.
9. Нанесіть гель тонким шаром (приблизно 0.2 мл на кожну щелепу), на передню поверхню зубів.
10. Використовуйте браші, злегка втираючи гель для більш щільного контакту з емаллю.
11. Розташуйте лампу Magic Light Pro+ або Pro максимально близько до зубів пацієнта, розмістивши рівномірно відносно верхньої і нижньої щелепи, не торкаючись губ. Увімкніть на 15-20 хвилин.
12. Після кожного нанесення, змивайте гель, висушуйте зуби і наносіть гель наново.

Закінчення процедури

13. Після закінчення процедури, ретельно промийте ротову порожнину, видаліть полімерізований коффердам, зніміть насадку-канюлю, закрийте шприц і сховайте в холодильник.
14. Змастіть вітаміном Е ясна і губи пацієнта.
15. Зробіть додаткові фотографії для фіксації результату та оцінки процедури.
16. Нанесіть гель для ремінералізації та зняття чутливості на 30 хвилин.
17. Заберіть гель ватним тампоном і не промийте ротову порожнину.

ВАЖЛИВО: Загальний час дії відбілюючого гелю не повинен перевищувати 65 хвилин. Більш детальну інформацію можна знайти в розділі Протоколи. За необхідністю, зробіть ще 1 або 2 нанесення відбілюючого гелю, але не раніше наступного дня.

ВЖИВАННЯ ЇЖИ ЧИ РІДИНИ ПІСЛЯ ПРОЦЕДУРИ: Не рекомендуємо їсти чи пити протягом 4 годин після відбілювання.

ПРОДОВЖЕННЯ ПРОЦЕДУРИ: Для отримання найкращих та ще більш тривалих результатів ми рекомендуємо використовувати домашнє відбілювання Magic Smile через 2-5 днів після кабінетного відбілювання.

MAGIC MINERALS

Ремінералізуюча терапія

Коли застосовувати?

Для максимально ефективної ремінералізації, гель краще використовувати на наступний день після відбілювання. Для зменшення, чутливості ремінералізуючу терапію краще провести відразу після відбілювання.

Ми рекомендуємо використовувати ремінералізуючу терапію після кожної процедури відбілювання, щоб зменшити чутливість і підвищити насиченість емалі мінералами.

Як застосовувати?

1. Розмістіть пацієнта в кріслі, надягніть нагрудник і ретрактор.
2. Нанесіть гель Magic Minerals на чисті, сухі зуби, на 30 хвилин, тонким шаром по 0.3 мл на кожну щелепу. Не застосовуйте лампу.
3. Заберіть залишки гелю ватним тампоном і не полощіть рот.
4. Протягом 2 годин не можна їсти і пити.

Гідроксипатит (НАр) є основним природним компонентом для відновлення захисного шару та насичення емалі мінералами.

Цитрат Калію (РС) є ефективним компонентом для зниження чутливості зубів. Іони Калію проникають у дентин та знижують чутливість нервів у пульпі зуба.

Кальцій (Са) заповнює ослаблені області емалі, одночасно зміцнюючи її для захисту від ерозії та карієсу.

Магній (Мg) є мінералом для загального здоров'я, відіграючи важливу роль у формуванні міцних зубів та кісток.

MAGIC DAM

Гель для захисту ясен (рідкий коффердам)

Коли застосовувати?

Для уникнення подразнень та пошкодження ясен рекомендуємо використовувати рідкий коффердам. Magic Dam має контрастний синій колір, утворює міцний захисний бар'єр ясенного краю і легко видаляється.

Як застосовувати?

1. Проведіть підготовку до процедури відбілювання.
2. Візьміть шприц Magic Dam і встановіть насадку-канюлю для зручності нанесення.
3. Для посилення адгезії ретельно просушіть зуби і ясна.
4. Нанесіть рідкий коффердам шаром 1.5–2 мм завтовшки на ясенний край. Матеріал повинен трішки закривати шийки зубів, але не більше 0.5 мм емалі і входити в міжзубний простір. Також можна закривати дефекти зуба: клиновидні дефекти, стирання, глибокі тріщини і відколи.
5. Після нанесення матеріал полімеризуються послідовним засвіченням по 15–20 сек. за допомогою стандартної фото-полімерної лампи.
6. Після процедури підніньте затверділий коффердам за краєчок і видаліть його.
7. Закрийте шприц MagicDam і зберігайте його в темному та прохолодному місці.

ПРОТИПОКАЗАННЯ

Відбілювання не рекомендоване пацієнтам:

- До 18 років (оскільки пульпа ще повністю не сформувалася).
- З нереалістичними очікуваннями (наприклад, пацієнт із природним кольором зубів А3 очікує А1).
- З підвищеною чутливістю зубів, тріщинами, оголеною шийкою зубів чи ерозією.
- З карієсом, хворобами емалі чи ясен або інфекціями зубів / ротової порожнини.
- Яким нещодавно (2-3 тижні) проводили процедури які передбачають полімеризацію або бондинг (відбілювання впливає на процес бондингу).
- З ГЕРХ або у яких підвищена кислотність, що призводять до слабкої емалі або підвищеної чутливості.
- Зі значним зменшення емалі у результаті патологічної або вікової стертості.
- Вагітним або жінкам, які годують.

Реставрації, коронки та вініри, не відбілюються і можуть потребувати заміни після відбілювання зубів. У той же час, деякі старі реставрації придатні для відбілювання, у випадку коли пігмент накопичився в порах матеріалу, однак сам матеріал непридатний для відбілювання.

РЕЖИМ ХАРЧУВАННЯ ПІСЛЯ ВІДБІЛЮВАННЯ

Для тривалого результату відбілювання, протягом 3 днів після процедури, обов'язково уникайте:

- Продукти, що містять барвники.
- Паління.
- Занадто гарячих і холодних продуктів.
- Помад і блиску для губ.
- Будь-які продукти або напої, що можуть залишити кольорову пляму на білій сорочці.
- Кольорові пасти та ополіскувачі.

Ми рекомендуємо дотримуватися «Білої дієти» не менше двох тижнів після процедури відбілювання зубів. Це забезпечить найкращі та найдовші результати та усуне не бажане забарвлення зубів.

“БІЛА ДІЄТА”

Відмова від страв, продуктів і напоїв, що містять велику кількість барвників:



Кава, чай та напої на їх основі



Соки, вина, морси, лимонади



Шоколад, інші страви та напої, що містять какао



Овочі, фрукти, ягоди, що викликають фарбування: буряк, чорниця та ін.



Кетчуп та інші кольорові соуси, прянощі



Напої, що містять велику кількість кислот: цитрусові, газовані напої, смузі



Кольорові пасти та ополіскувачі

Зверніть увагу: Якщо ви спожили їжу або напої, які можуть забарвити емаль - якнайшвидше скористайтесь пастою Magic Foam для очищення зубів. Це допоможе зменшити ефект забарвлення та зберегти результати відбілювання.

ІНГРЕДІЄНТИ

Гель для відбілювання зубів:

Відбілюючий гель: перекис водню, цитрат калію, гліцерин, деіонізована вода, пропіленгліколь, карбомер, карбоксиметил, полівінілпіролідон, ментол, триетаноламін.

Активуючий агент: деіонізована вода, гліцерин, пропіленгліколь, карбомер, гідроксид натрію, заліза глюконат дигідрат, активний ензим (CAT), харчовий пігмент: CI 17200.

Рідкий кофердам Magic Dam:

Діуретан диметакрилат, діоксид кремнію, 4-метакрилоксиетил тримелітовий ангідрид, діоксид титану, ініціатори полімеризації, сахарин натрію, харчовий пігмент (карбонат кальцію, діоксид кремнію, дріжджовий білок).

Ремінералізація Magic Minerals:

Гідроксиапатит, цитрат калію, гліцерофосфат кальцію, хлорид магнію, гліцерин, деіонізована вода, 1,2-пропандіол, карбомер, полівінілпіролідон, полуксамер-407, ментол, харчовий пігмент (карбонат кальцію, діоксид кремнію, дріжджовий білок).

Вітамін E:

Вітамін E, гліцерол.

ДІСКЛЕЙМЕР

Відбілювання можливе лише до природного кольору зубів і не змінює його ні в якому разі. Результати відбілювання можуть відрізнятись у різних людей в залежності від типу зубів, або щільності пігменту. Однак, процедура відбілювання, все одно допоможе розщепити пігмент і повернути зубам їх природний колір.


Зберігайте в недоступному для дітей місці. Уникайте потрапляння гелю в очі або на шкіру. Якщо це все ж таки сталося, витріть гель і ретельно промийте водою. Гелі MagicSmile використовуються тільки для відбілювання зубів відповідно до інструкції. Перед застосуванням уважно ознайомтеся з інструкцією, протипоказаннями та доглядом після процедури.

Відбілюючі гелі Magic Smile призначені виключно для відбілювання зубів, як зазначено в інструкції. Гель Magic Minerals призначений тільки для нанесення на зуби. Гель шкідливий для здоров'я, якщо проковтнути його у великій кількості.

Усі шприци і тюбики одноразові та не можуть і не повинні використовуватися повторно.

За 1 процедуру можна відбілити зуби до 12 тонів за шкалою відбілювання. Також можливий ефект відбілювання лише на один відтінок. Ефект відбілювання зберігається від 1 до 12 місяців.

Система відбілювання зубів Magic Smile надається на умовах "як є" без будь-яких гарантій або зобов'язань. В асоціації з продуктом, Magic Smile Corp. не надає жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, гарантіями комерційної придатності, придатності для певної мети, права власності чи непорушення прав третіх сторін. Продукт використовується споживачем на власний розсуд. Жодних заяв або гарантій, явних чи неявних, щодо комерційної придатності, придатності для певної мети, продуктів про які йдеться в інформації, можна використувати без порушення прав інтелектуальної власності інших осіб, або будь-якого іншого характеру щодо інформації чи продукту про який згадується. У жодному разі ця інформація не буде вважатися частиною наших умов продажу.

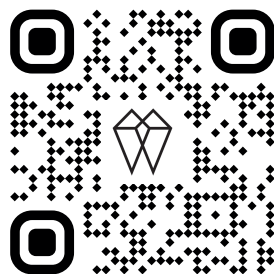

www.MagicSmile.ua
info@MagicSmile.ua